

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES

by Fim Medical

UNE EXIGENCE IMPÉRISSABLE



FILTRES

Ergofilters® SP1
et SP1M



PINCE-NEZ

pour spiromètres
SPL10 USB et Q13.
Disponibles en 4 coloris.




**CAPTEURS
QFLOW®**

pour spiromètre
Spirolyser® Q13



**PIPETTES &
PIÉGEURS**

pour TABATABA®v2

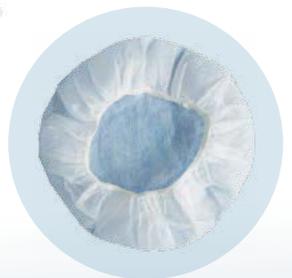

BONNETTES

pour Audiolyser® et
Visioclick®

CE
0459

FIM
Medical

Une gamme adaptée à tous les besoins

Garanti sans latex

Usage unique



Ergofilter® SP1
Conditionnement : carton de 200

Ergofilter® SP1M
Conditionnement : carton de 140

FILTRES ERGOFILTER® SP1 ET SP1M

Les **Ergofilter® SP1** (avec embout buccal) et **SP1M** (avec embout mâchoire souple) sont des filtres bactériens et viraux prévus pour être utilisés avec le spiromètre SPL10 USB de la marque FIM MEDICAL. Les filtres **Ergofilter®** sont conçus et adaptés pour les examens d'exploration fonctionnelle respiratoire (spirométrie). Les filtres **Ergofilter®** sont conçus pour que leur résistance cumulée à celle du spiromètre SPL10 USB ne dépasse pas les recommandations des ATS / ERS.


Type de filtre	Filtre à usage unique
Emballage	Sachet individuel non stérile
Date limite d'utilisation	Voir étiquetage du carton
Stockage / transport	T° : entre 0°C et 50°C Humidité : 75% max.
Type de membrane	Electrostatique
Rétention bactérienne (Aérosolisation de micro-organismes bacillus atrophaeus nctc 10073)	99,99% ⁽¹⁾
Rétention virale (Aérosolisation de micro-organismes ms-2 coliphage ncimb 10108)	99,84% ⁽¹⁾
Résistance à 14L.s-1	1,1 cm H ₂ O.L ⁻¹ .s
Volume mort	65mL
Classe médicale	Classe IIa

⁽¹⁾ Les essais d'efficacité bactérienne et virale des filtres Ergofilter® ont été réalisés par le laboratoire Public Health England, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JG United Kingdom



ATTENTION

- Toujours utiliser un filtre Ergofilter® SP1 ou SP1M entre le patient et le spiromètre.
- Les filtres Ergofilter® SP1 ou SP1M sont à usage unique.
- L'utilisation de filtres ne dispense pas de décontaminer régulièrement le matériel.
- Les accessoires souillés doivent faire partie d'une collecte sélective pour déchets biologiquement souillés (DASRI).

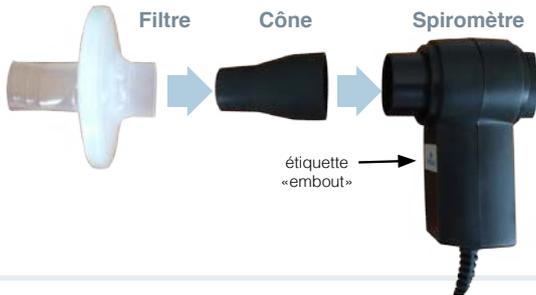

Installation des filtres Ergofilter® SP1 ou SP1M

- 1 Sortir le filtre de son emballage
- 2 Ne pas toucher la partie buccale du filtre avec les doigts mais le tenir par la circonférence
- 3 Utilisez le filtre dans le bon sens car il n'est pas réversible
- 4 Montez le cône sur le spiromètre (côté étiquette « embout ») puis connectez le filtre sur le cône

Une touche de couleur et de fantaisie



Pince-nez
Conditionnement : carton de 200 (50 de chaque)

PINCE-NEZ POUR SPIROLYSER® SPL10 USB ET Q13

Le **pince-nez FIM MEDICAL** est un accessoire développé spécifiquement pour les spiromètres SPL10 USB et Q13.

Installation des pince-nez

- Sortir le pince-nez de son emballage
 - Ne pas toucher la partie en mousse avec les doigts mais le tenir par le corps
 - Positionner le pince-nez sur votre nez afin de boucher les narines
- Utilisation :** Changer systématiquement le pince-nez à usage unique entre chaque patient

Élimination des déchets : Les accessoires souillés doivent faire partie d'une collecte sélective pour déchets biologiquement souillés (DASRI).

Pince-nez avec mousses biocompatibles	Usage unique
Date limite d'utilisation	Voir étiquetage du carton
Stockage / transport	T° : entre 0°C et 50°C Humidité : 75% max.
Classe médicale	Classe IIa



ATTENTION

- Utilisation uniquement par un médecin ou un professionnel de santé.
- Ne jamais confier le pince-nez aux enfants.
- Le pince-nez est à usage unique.

CAPTEURS QFLOW®


POUR SPIROLYSER® Q13

Les capteurs **Qflow**® sont des capteurs à usage unique développés spécifiquement pour fonctionner avec le spiromètre Spirolyser® Q13. Les capteurs **Qflow**® sont conçus et adaptés pour les examens d'exploration fonctionnelle respiratoire (spirométrie). Les capteurs **Qflow**® sont conçus pour que leur résistance cumulée à celle du spiromètre Spirolyser® Q13 ne dépasse pas les recommandations des ATS / ERS.

Afin de réduire au maximum les risques de contaminations croisées entre patients, le Spirolyser® Q13 ainsi que le capteur **Qflow**® disposent de technologies innovantes. Des essais menés par le laboratoire d'essais bactériologiques Public Health England (Salisbury - Angleterre) ont démontrés qu'avec la conception interne du produit associée au capteur **Qflow**®, la contamination croisée entre patients était sans risque à 99,999% avec changement de capteur **Qflow**® entre chaque patient. La conception innovante du produit permet aussi de ne pas avoir de contamination dans les parties internes non accessibles.

Usage	Usage unique
Emballage	Sachet individuel non stérile
Date limite d'utilisation	Voir étiquetage du carton
Stockage / transport	T° : entre 0°C et 50°C Humidité : 75% max.
Classe médicale	Classe IIa

concept précurseur

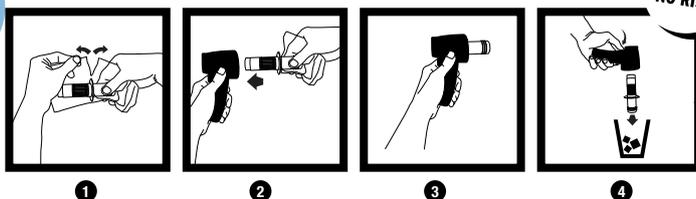

Installation des capteurs Qflow® dans le Spirolyser® Q13 : Etapes 1, 2, 3

- Repérez la zone d'ouverture en pointillée
- Tenir d'une main l'ensemble côté embouchure (petit côté de l'emballage)
- Ouvrez de l'autre main la partie détachable de l'emballage du Qflow® selon les pointillés
- Insérez le Qflow® dans l'orifice de l'appareil jusqu'en buté
- Retirez et jeter le reste de l'emballage

Ejection des capteurs Qflow® du Spirolyser® Q13 : Etape 4

- Positionner le spiromètre au-dessus d'une poubelle
- Pousser vers le haut la gachette située à l'arrière de la poignée du spiromètre
- Le capteur Qflow® s'éjecte



l'unique !

Capteur QFlow®
Conditionnement :
carton de 200



ATTENTION

- Les capteurs Qflow® sont à usage unique.
- L'utilisation de capteur à usage unique ne dispense pas de décontaminer régulièrement le matériel.
- Les accessoires souillés doivent faire partie d'une collecte sélective pour déchets biologiquement souillés (DASRI).





PIPETTES ET PIÉGEURS

POUR APPAREIL TABATABA®v2

Les **pipettes et piègeurs** FIM MEDICAL sont des accessoires développés spécifiquement pour l'appareil TABATABA®v2 (appareil de détection de monoxyde de carbone (CO) dans l'air expiré).

Installation des pipettes et piègeurs :

- Sortir le piègeur et la pipette de son emballage
- Ne pas toucher la partie buccale de la pipette avec les doigts mais le tenir par le corps
- Montez la pipette dans le piègeur et l'ensemble sur l'appareil

Utilisation :

- Changer systématiquement la pipette à usage unique entre chaque patient
- Changer systématiquement le piègeur à usage unique entre chaque patient
- A l'aide d'un chiffon, nettoyer le détecteur de CO avec un produit bactéricide fongicide sans alcool
- Ne pas inspirer dans la pipette (risque de contamination)


Elimination des déchets :

Les accessoires souillés doivent faire partie d'une collecte sélective pour déchets biologiquement souillés (DASRI).

Pipettes et piègeurs	Usage unique
Emballage	Sachet individuel non stérile
Date limite d'utilisation	Voir étiquetage du carton
Stockage / transport	T° : entre 0°C et 50°C Humidité : 75% max.
Classe médicale	Classe Im

ATTENTION

- Utilisation uniquement par un médecin ou un professionnel de santé.
- Toujours utiliser un ensemble pipette et piègeur avec l'appareil TABATABA®v2.

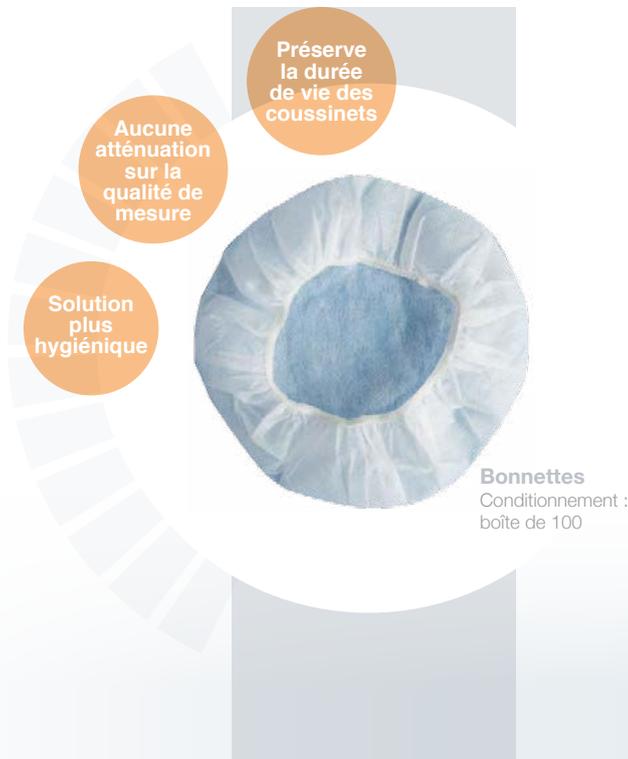

PACK DE BONNETTES

BIOCOMPATIBLES À USAGE UNIQUE pour tous vos tests effectués avec Audiolyser® et Visioclick®.

Diamètres :

Bonnettes pour Audiolyser® : 11 cm. Bonnettes pour Visioclick® : 8 cm

Installation des bonnettes :

Positionner les bonnettes à usage unique sur chaque coque du casque audiométrique.

Utilisation :

Changer systématiquement les bonnettes à usage unique entre chaque patient.

Elimination des déchets :

Les accessoires souillés doivent faire partie d'une collecte sélective pour déchets biologiquement souillés (DASRI).