

TESTADOR DE CO



RECUPERE
O FÔLEGO

TABATABAV3[®]



**ANALIZADOR DE CO
NO AR EXPIRADO :**

- ▶ Interface moderna e simples de utilizar
- ▶ Ecrã táctil largo
- ▶ Resultado instantâneo em PPM, % HbCo e % HbCo fetal
- ▶ Duração de vida célula: 5 anos



CE
0459



Porta de carregamento
USB-C

Funciona sem pilha

Botão de iniciação

Ecrã táctil largo 2,8"

Limpador e pipeta descartáveis

com válvula antirretorno e peça bucal de utilização
única (compatíveis com Tabataba V2 e V3).



O SEU NOVO IMPULSO CONTRA O TABAGISMO ATIVO E PASSIVO

Simples, fiável, reproduzível, o **TABATABA V3®** é um aparelho de medição destinado aos profissionais da saúde (médicos tabagistas, saúde no trabalho, associações, maternidades, pneumologistas, farmácias...)

Mede a taxa de CO no ar expirado e permite garantir um **acompanhamento** no âmbito de um **abandono do tabagismo**. Permite igualmente **medir o nível de CO no ar ambiente**. Largamente adotado por vários médicos, é também um excelente instrumento pedagógico. O seu poder de sensibilização para parar de fumar é incontestável.

COMANDE O SEU APARELHO COM A PONTA DOS DEDOS

Com o ecrã táctil largo, o **TABATABA V3®** oferece uma experiência de utilizador inédita.

Informatizado, sem pilha e **sem fio**, oferece mais liberdade. A bateria recarrega com o cabo USB. As informações e resultados podem ser consultados **instantaneamente** no aparelho e/ou **exportados por Wi-Fi**.

TABATABAv3®

VANTAGENS DA APLICAÇÃO WEB

- ▶ Gestão das informações produtos (n.º de série, calibração de dados...)
- ▶ Gestão das informações pacientes seguras (medidas guardadas, identidade-paciente...)
- ▶ Configurações do aparelho (prazo de expiração...)
- ▶ Exportação dos dados para CSV
- ▶ Geração de um relatório paciente em PDF



ETAPA 1



Carregar em
« Iniciar o teste »

ETAPA 2



O paciente deve inspirar
e depois bloquear a
respiração durante
a contagem regressiva

ETAPA 3



O paciente deve soprar
lentamente até
desaparecer a instrução

ETAPA 4



Aparece o resultado
em PPM*, HbCO%* ou
HbCOf%*

ETAPA 5



Guardar
os dados

*PPM partículas de CO por milhão de partículas de ar ; % HbCO: taxa de carboxihemoglobina ; %HbCOf: taxa de carboxihemoglobina fetal

O SEU DISTRIBUIDOR

**FUMAR
MATA... NÃO
FAZER NADA
TAMBÉM!**

Tenha o reflexo de ter a sua **“calculadora de CO”** à mão! O **TABATABA V3®** permite testar rápida e eficazmente a taxa de CO expirada do tabagismo ativo e passivo.



ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS

Não vendidos com o aparelho:

- Pipetas de utilização única (caixa de 250)
- Limpadores de utilização única (caixa de 250)

5
ANOS
VIDA ÚTIL
CÉLULA

2
ANOS
GARANTIA
TABATABA®



51 rue Antoine Primat - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex France

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

CE
0459